

コウブライトご使用前の準備

洗浄・滅菌

■ 洗浄方法

- ① 本体内に電池が入っていないことを必ず確認してください。
- ② 流水による用手洗浄を行ってください。

注意点

テールキャップは確実に締まっていることを確認してください。
磨き粉や金属タワシは使用しないでください。
洗剤は中性洗剤をご使用ください。
超音波洗浄はしないでください。

■ 滅菌方法

	EOG滅菌	過酸化水素低温 プラズマ滅菌	オートクレーブ滅菌
照明器本体	○	○	×
プラスチック鉤	○	○	○
指掛け	○	○	○
電池挿入器	○	○	○

洗浄・滅菌の条件や注意事項の詳細は取扱説明書をご確認ください。

手術前の準備

■ 電池の挿入手順

- ① 清潔看護師 (器械出しの看護師など) がテールキャップを開ける。
- ② 清潔看護師 が照明器本体の電池挿入口に、滅菌した電池挿入器を取り付ける。
- ③ 不潔看護師 (外回りの看護師など) が電池を挿入する。
- ④ 清潔看護師 がテールキャップを締める。



注意点

電池は＋極から挿入してください。
テールキャップは止まるところまで確実に締めてください。

手術が終了したら電池を抜き、上記の手順で洗浄・滅菌をしてください。