

D プロテクト 取扱説明書

ご使用の際は必ず眼鏡 + シールドのセットでお使いください。

※眼鏡だけのご使用では遮蔽効果は期待できません


装着方法

- ① カバーの中へ
向きを確認して
遮蔽材を入れる。




※写真は左用の場合です。
右用の場合は遮蔽材の印刷面が裏になります。


- ② カバーの端（赤線）に沿わせて折り曲げる。
マジックテープで止める。

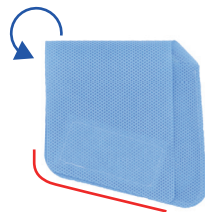

- ③ 遮蔽材が外側になるようにし
カバーの中にツルを通す。

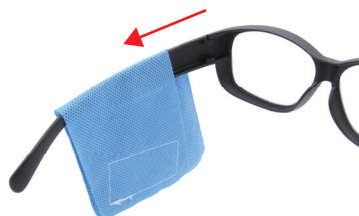


- ④ 必ず遮蔽材が**レンズより前**に
出るようにして装着する。
クリップをツルの中央部分に差し込み
前にスライドしてシールドを固定する。

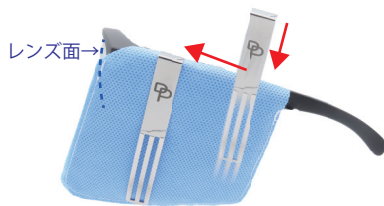

オーバーグラスとしてご使用の際は、メガネに傷が付く場合がございますのでクリップのメガネが当たる部分にサージカルテープなどを貼ってご使用ください。

遮蔽材・クリップの調整

写真のように遮蔽材が頬に接するように
遮蔽材・クリップを調整して下さい。

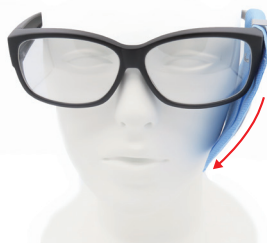

遮蔽材の中にワイヤー
（黄色い部分）が入って
いるので頬に沿うように
曲げてください。



クリップの角度は
丸の部分を指でゆっくり
曲げて調整してください。