

コウブライトご使用前の準備

洗浄・滅菌

■ 洗浄方法

- ① 本体内に電池が入っていないことを必ず確認してください。
- ② 流水による用手洗浄を行ってください。

注意点

テールキャップは確実に締まっていることを確認してください。
磨き粉や金属タワシは使用しないでください。
洗剤は中性洗剤をご使用ください。
超音波洗浄はしないでください。

■ 滅菌方法

	EOG滅菌	過酸化水素低温 プラズマ滅菌	オートクレーブ滅菌
照明器本体	○	○	×
先端鉤	滅菌済み		
指掛け	○	○	○
電池挿入器	○	○	○

洗浄・滅菌の条件や注意事項の詳細は取扱説明書をご確認ください。

手術前の準備

■ 電池の挿入手順

- ① 清潔看護師(器械出しの看護師など)がテールキャップを開ける。
- ② 清潔看護師が照明器本体の電池挿入口に、滅菌した電池挿入器を取り付ける。
- ③ 不潔看護師(外回りの看護師など)が電池を挿入する。
- ④ 清潔看護師がテールキャップを締める。



注意点

電池は＋極から挿入してください。
テールキャップは止まるところまで確実に締めてください。

手術が終了したら電池を抜き、上記の手順で洗浄・滅菌をしてください。

コウプライトS照明器 洗浄時の注意事項

※コウプライトS照明器は精密機器です。内部に水が侵入すると故障の原因になります。電池挿入口から水が侵入した場合も故障の原因になります。
以下の1～4の手順で、各注意事項を守り洗浄してください。

1 流水による用手洗浄を行う。

[注意事項]


- ◆テールキャップと照明器本体(グリップ)を別々に洗浄しない。
- ◆テールキャップは確実に締めた状態で洗浄する。



2 用手洗浄後はタオル、布で拭き上げ。

[注意事項]


- ◆照明器全体を水滴が残らないように拭きあげる。
(左記写真の○囲みの凹凸部分は特に注意)

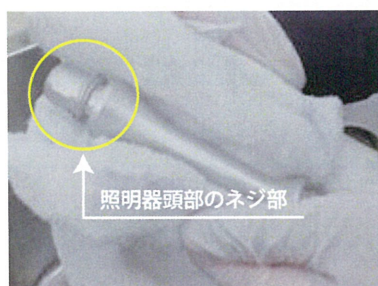

3 エアーを吹きかけ水滴を除く場合。

[注意事項]

- ◆テールキャップを開けた状態で、エアーを吹きかけないこと。
(電池挿入口から水滴が侵入する原因になります)

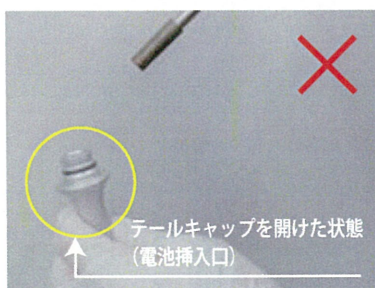

4 テールキャップ内部の洗浄。

[注意事項]

- ◆「電池挿入口付近」、「テールキャップ内部」は水に湿らせたタオルで拭き上げる。
- ◆手が濡れた状態で、拭き上げない。

