


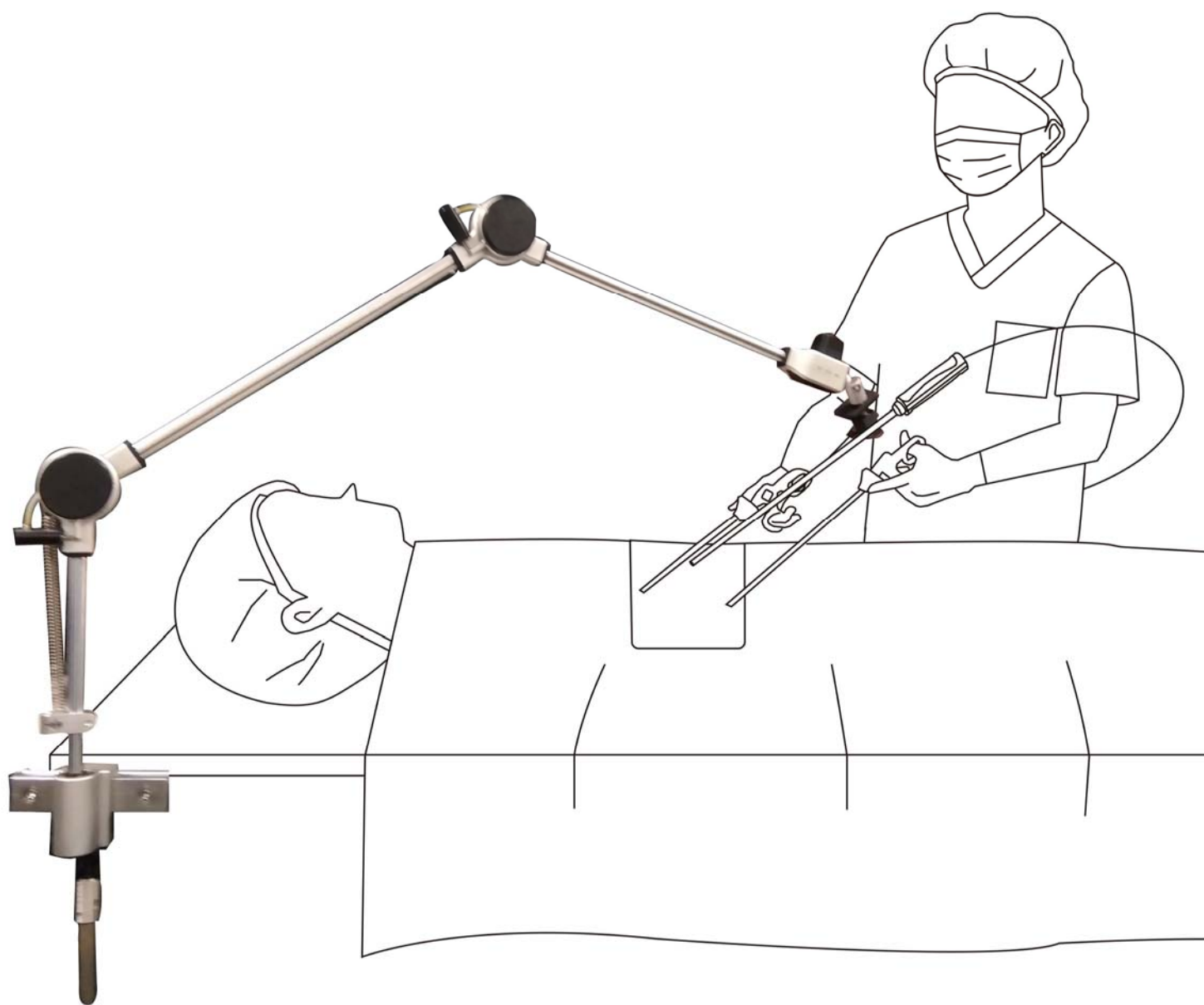

APOLLOCK

アポロック

新機構を採用したスコープホルダー
電源不要で操作が自在

APOLLOCK

電源不要、手元のボタン1つでフリー⇄ロックが切り替えられる
新機構を採用したスコープホルダー

【特徴】

クラッチ式のロック機構

- ・手を離したらロックする設計のアーム機構

片手操作可能

- ・片手で鉗子を持ちながらスコープの位置を調整可能

ワンプッシュ操作

- ・ワンプッシュでアームの移動および保持が外部電源無しで可能

コンパクト

- ・持ち運びやすい軽くスリムなデザイン

固定位置を問わないアーム長

- ・症例によって最適な位置に取り付けられるため術者の妨げになりにくい

カメラの脱着がしやすい先端設計

- ・横からカメラを掴むことでカメラの取付け / 取外しに配慮

【製品の仕様】


サイズ アーム全長 1000 mm

外観図、使用部品名称及び寸法（参考値）

保持力 MAX 1.5 kg（参考値）

滅菌可否 不可（専用カバー使用）

本体重量 約 2.9 kg（参考値）

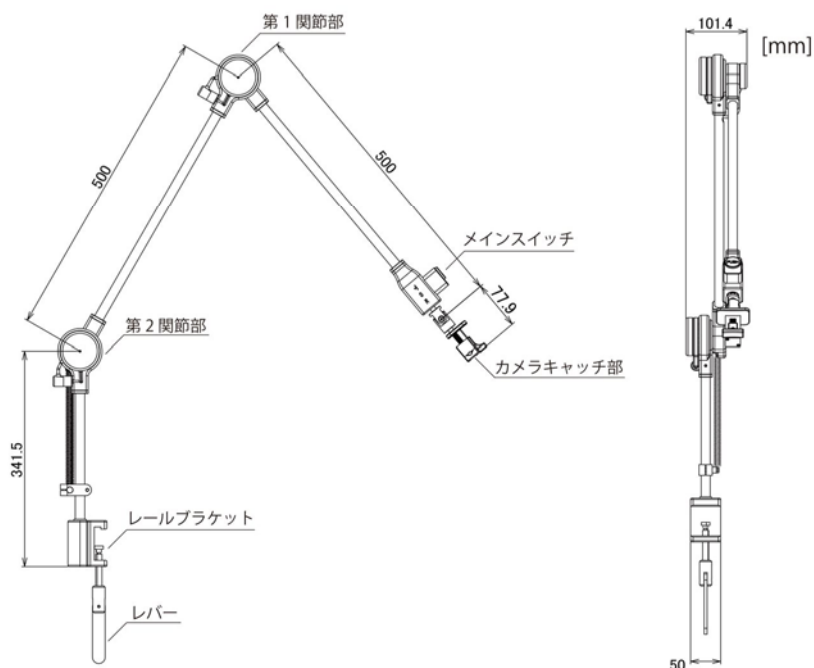

【使用前の準備】

ステップ 1


手術台レールにレールブラケットの上溝を引っ掛け、レバーを回転させ、固定する。

ステップ 2

専用カバーを製品全体に被せる。


ステップ 3

専用カバー越しに、カメラキャッチ部で内視鏡を把持する。

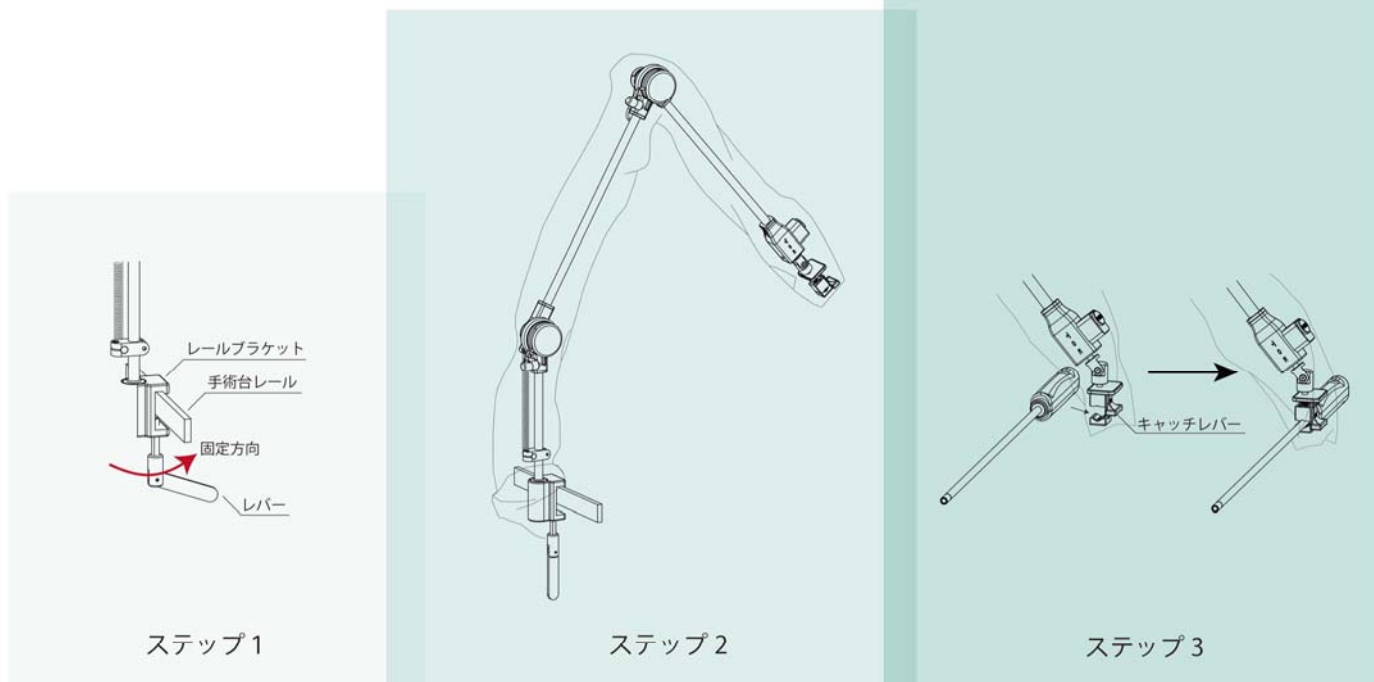

【使用操作方法】

メインスイッチを押すことでロックが解除、必要な位置まで動かしてメインスイッチから指を離すとその位置で保持されます。また、上方向への調整はメインスイッチの操作が不要です。

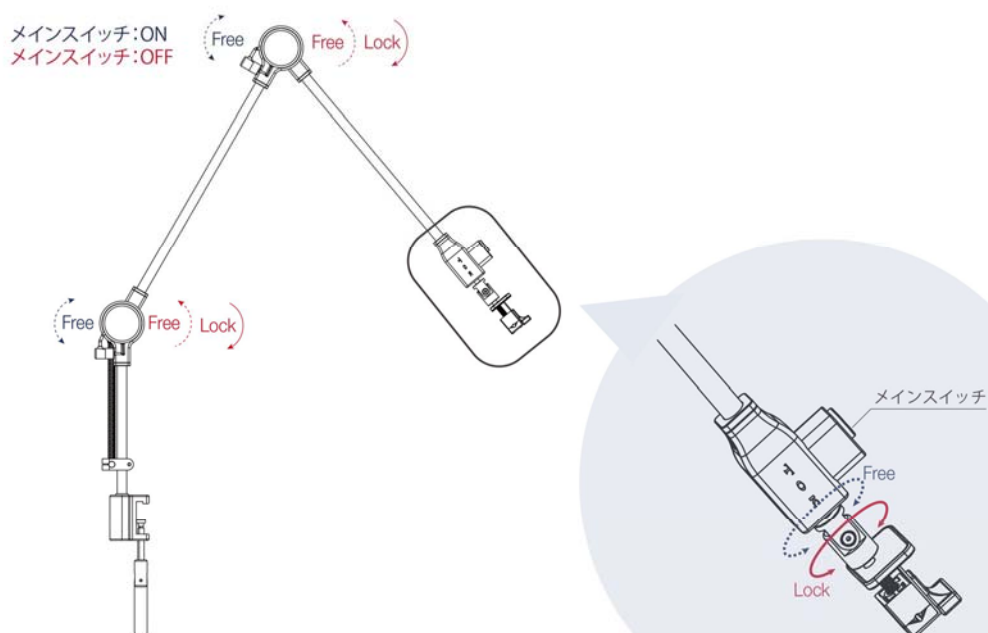

YouTube動画
APOLLOCK操作方法



【製品情報】

■本体

商品名称 APOLLOCK

商品コード 04-067A

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249ST0008

クラス分類 1

■専用カバー

商品名称 APOLLOCKカバー

商品コード 05-006A



製造販売業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-20

TEL : 03-3811-2126 FAX : 03-3811-5155



製造業者

株式会社 TOK

〒174-8501 東京都板橋区小豆沢 1-17-12

TEL : 050-1720-0482