
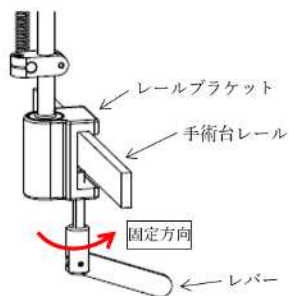
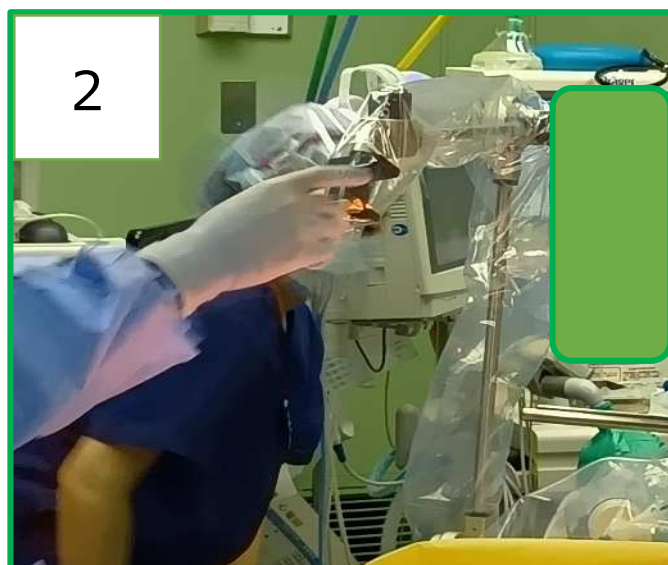


APOLLOCK 事前準備の流れ

APOLLOCK レール固定→患者様消毒→APOLLOCK カバー装着→ドレープ掛け→（布鉗子等で固定）

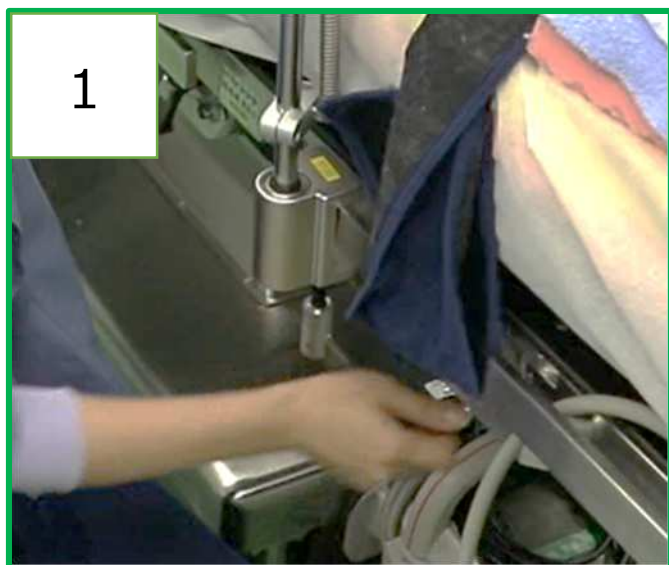


手術台レールに
レールブラケットの上溝を引っ掛け、
レバーを回転させて
固定してください。

患者様消毒後、専用カバーを、
カメラキャッチ側からレールブラケットが隠れるように
アーム全体に被せてください。



患者様ヘッドドレープを掛けてください。

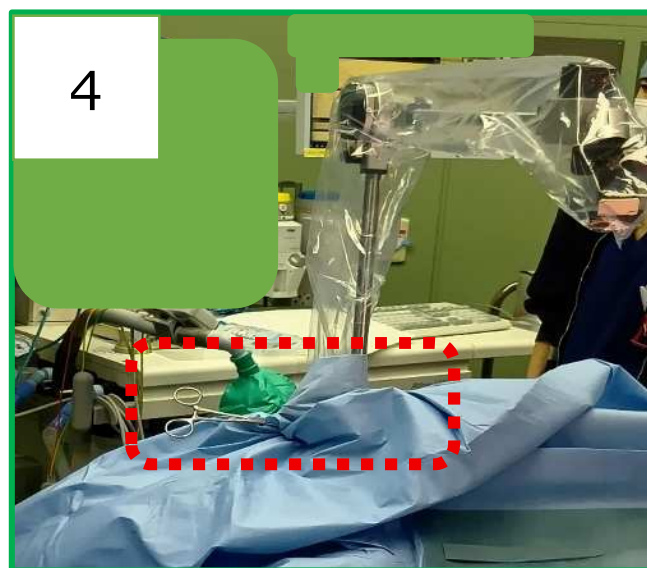

必要があれば布鉗子等で固定してください。
（赤点線部参照）